

Meywalk® 2000



MEYWALK® 2000 leveres som standard med sæde, kropstøtte, rumpestop, håndbøjle, fenderhjul og parkeringsbremsen.



MEYWALK® 2000 har et indbygget hæve-/sænkesystem, der letter ind- og udstigning for brugeren. Låseknapperne foran på MEYWALK® 2000 udløses, og kippøjlen vippes op, hvorved sædeenheten sænkes ca. 15 cm for str. Medium og ca. 25 cm for str. Large. Når brugeren er på plads, hæves sædeenheten igen ved at kippøjlen trykkes ned, til den låser med et hørbart klik.

meyland-smith
mobility and more

Den fjedrende gangvogn...

MEYWALK® 2000 fra Meyland-Smith er videreudviklingen af den kendte MEYWALK® gangvogn. Nu har den fået trinløs lynindstilling af kropstøtte- og sædehøjde. MEYWALK® 2000 Medium er for børn fra ca. 6 til 14 år, og MEYWALK® 2000 Large går fra ca. 14 år helt op til voksenstørrelse. Sæde og kropstøtte er fjederophængt til hjælp for en bedre og mere naturlig gangafvikling. Sædeenheten kan med en kippøjle sænkes, hvilket gør ind- og udstigning lettere for brugeren og mindre belastende for hjælperne. Brugers kropsholdning kan indstilles trinløst fra lodret til 15° foroverbøjet, og det gør det muligt at finde den kropsholdning, der giver brugeren bedst kontrol. MEYWALK® 2000 er fremstillet i kvalitetsmaterialer, der sikrer lang levetid, maksimal pålidelighed og minimal vedligeholdelse. MEYWALK® 2000 er derfor egnet til både indendørs og udendørs brug.

Tilbehør

Antitipstøtter.

Ekstra lange afstandsør (Giver 6 cm ekstra højde - kun str. Large)

Højdeformindsker-beslag (Giver 8 cm mindre højde)

Slæbebremser

Returløbsspærrer (kan frakobles)

Benglidestyr

Svinghjulslås til forhjulene (kan frakobles)

Hofte-/sidedstøtter

Tværerbøjle - uden sadelpind


Polstret ben-skilleplade



Anti-tip støtter



Benglidestyr

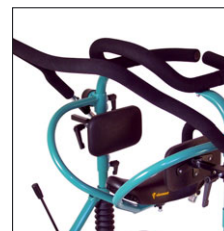


Hofte-/sidedstøtter



MEYWALK® 2000's sæde og kropstøtte er fjederophængt, og fjedrene her til fås i fire forskellige styrker, der bør passe til brugerens vægt:

- Mindst 20 kg = Hvide fjedre.
- Mindst 45 kg = Gule fjedre.
- Mindst 65 kg = Blå fjedre.
- Mindst 80 kg = Røde fjedre.

Kropstøttestørrelsen skal oplyses ved bestilling !

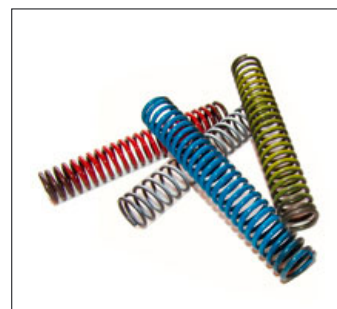

Fakta om Meywalk® 2000

Længde:

Medium:

Large:

Bredde:

Sædehøjde / Skridtlængde:

Kropsstøttehøjde:

Hjulstørrelse, for:

Hjulstørrelse, bag:

Vægt:

Max. brugervægt:

95 cm

70 cm

58 - 83 cm

91 - 115 cm

200 x 50 mm

400 x 50 mm

25 kg

100 kg

95 cm

70 cm

72 - 103 cm

105 - 136 cm

200 x 50 mm

400 x 50 mm

26 kg

100 kg

Stel er fremstillet i pulverlakeret stålør. Enkelte dele er sort forchromet eller el-galvaniserede. Hjulene er massive (purbane) hjul. Fælge og forhjulsgafler er i sort plast med kuglelejer. Polstringer er fremstillet i sort vandafvisende skumovertræk. Sædebetræk er i sort vandafvisende kunststoflæder. (Ret til ændring af design og konstruktion forbeholdes)

meyland-smith
mobility and more

Meyland-Smith a/s

Industrivej 27 DK-9830 Taars

Tel: +45 98 96 19 85 Fax: +45 98 96 19 86
www.meyland-smith.dk info@meyland-smith.dk

Kropstøtten på MEYWALK® 2000 kan fås i fem størrelser og bør passe til brugerens brystmål:

- Max. 70 cm i omkreds.
- Max. 90 cm i omkreds.
- Max. 105 cm i omkreds.
- Max. 120 cm i omkreds.
- Max. 130 cm i omkreds.

Kropstøttestørrelsen skal oplyses ved bestilling !